

UroStill®——女性患者膀胱内自动滴注辅助装置，包含UroDapter®无导管滴注注射器适配器

用户指南

感谢您的购买UroStill®女性患者膀胱内自动滴注辅助装置。

UroDapter®注射器适配器可以使膀胱灌注治疗师处方的任何药物。UroDapter®能够替代导管，这意味着完全无痛，更舒适，卫生和更安全的滴注方式。

借助UroStill®滴注，您可以自己在家中进行滴注，因此无需每次治疗都去看治疗师，从而节省了宝贵的时间和金钱。

请仔细阅读本手册，因为它包含重要信息。

1. UroStill®必须根据您的治疗师的指示使用，仅用于膀胱滴注，仅用于规定的药物溶液。
2. 无菌包装中提供的部件都是一次性的。不要多次使用。不要尝试对其进行重新消毒。
3. UroStill®专为女性患者而设计。（男性患者可以使用UroDapter®注射器适配器。）
4. 不建议16岁以下的人使用UroStill®。

UroStill®的组成

5. UroStill®由以下不见组成：确保包装中包括所有物品。

标准

- UroDapter®泌尿外科注射器适配器，1个（一次性）
- 扩展部分，无菌包装，1个（一次性）
- 三向抽头，无菌包装，1个（一次性）
- 注射器和显示设备的塑料支架，1个
- 20毫升注射器的压缩环，1个（塑料支架中）
- 用户手册，1本
- 小袋，用于存放以上描述的所有物品，1个

选项

- 具有LED灯的内窥镜摄像机，1个（可通过微型USB端口连接到平板电脑）
- 华为平板电脑，兼容OTG，1个
- 平板电脑充电器，各1个
- 平板电脑支架，各1个

注射器（不包含）

- UroStill®可以用于20毫升或50毫升注射器，同样可以用于预装注射器。所有注射器均应为带硅胶密封活塞的卢尔锁注射器。

上述所有物品都可以安全地放在小袋中。

开始自我滴注之前

6. 完全排空膀胱。
7. 启动平板电脑并将其放在支架上。（建议平板电脑的电池充满电。）
8. 将摄像机安装到注射器和显示设备的塑料支架的相应（小）插槽中。用螺丝固定。
9. 将一次性用品从无菌包装中取出，包括UroDapter®、扩展部分和抽头。尽量保持无菌。您可以使用其覆盖内部进行此操作。
10. 按以下顺序将一次性用品彼此组装在一起（用螺丝固定在一起）：抽头，扩展部分，UroDapter®适配器。
11. 从包装中取出注射器。将其推入支架的孔中（对于50毫升注射器，内部塑料收缩环应拆下）。用锁将注射器固定。对于预装注射器，请取下注射器的安全盖。
12. 将抽头（和其它一次性用品一起）连接到注射器上。应使用的孔口垂直于其它孔口。
13. 将摄影机连接到平板电脑的微型USB端口。
14. 预先安装的OTGView应用程序应立即启动。如果没启动，请手动启动该应用程序。
15. 如需要，打开支架的锁并旋转注射器，直到UroDapter®的图像出现在显示器屏上。再次关闭锁。
16. 如果显示器屏上的图像角度似乎不合适（例如，图像上下颠倒），用螺丝松开摄影机，将其旋转直至UroDapter®适配器的尖端进入6小时的位置，然后再固定摄影机的位置。
17. 为了便于将适配器尖端对准尿道口，屏幕的水平镜像可能是有利的。此功能在OTGView的主屏幕上可用：按一次顶部中间的图标，再按一下出现的图标中从左数第二个图标，再按一次顶部中间的图标。

使用UroDapter®进行滴注

18. 找到最舒适且最适合自我滴注的体位。对于大多数女性来说，最好的题为是，放下脚，将腿向上拉一点。找到自我滴注的最佳题为可能需要一点时间。
19. 您可以用一只手打开阴唇，使尿道口清晰可见。
20. 用另一只手消毒患处，包括尿道口，阴唇内表面以及口周围的区域（接近3厘米宽度）。使用任何消毒液。也建议对UroDapter®的侵入部分进行消毒。
21. 在保持阴唇分开的同时，您应该将准备好的UroStill®注射器放到右手（如果您很灵巧），然后用UroDapter®接近孔口。
22. 您应遵循显示器屏上的活动并相应地控制自己的运动。

23. 使用UroDapter®的尖端可以陷入尿道。它应进入尿道约6毫米深。施加一些压力，使密封圈可以完全贴在附近的表面上。这样可以避免药物的泄漏。
24. 通过推动注射器的柱塞，将药物溶液或药物溶液混合物（“鸡尾酒”）通过尿道缓慢滴入膀胱。一定确保药物陷入尿道，而不是阴道。
25. 如果发生泄漏，请暂停滴注并检查UroDapter®的位置是否正确。
26. 压力太低或太高也会导致泄漏。可以通过推动柱塞来观察最佳压力：在没有泄漏的情况下，您应该能够轻松移动它。
27. 治疗结束后，您应尝试将尿液保持至少3小时，因此溶液可以在足够长的时间内影响膀胱和尿道。

清洁和维护

28. 拆卸UroStill®设备。
 - 一次性物品（带有无菌包装的，包括注射器）必须与包装一起丢弃。
 - 支架和摄影机可以使用抗菌溶液清洁。
 - 显示器和充电器可用适合清洁电子设备的任何溶液清洁。
 - 非无菌元素不需要额外的维护措施。但是，在使用它们之前，请务必检查它们是否完整。如有损坏，请勿使用。
29. 清洁并使其干燥后，将未消毒的部件放回袋中。

如果您有任何疑问或建议，请通过以下电子邮件地址与我们联系：mail@urosystem.com。感谢您对我公司产品的评论，因在不久的将来使用UroStill®可以变得更加舒适。

使用UroStill®有关的更多信息和视频演示，请访问我们的网页：www.urosystem.com